

福祉機器ブランドマーク

超軽量マグネシウム合金製4点杖

# テトラ・ケイン ラージベース


Sタイプ 約600g ±5% 約63.5~73.5cm ● Mタイプ 約620g ±5% 約73~83cm ●

# テトラ・ケイン ラージベース

立ち上がり補助機能付 Mタイプ 約800g ±5% 約73.5~83.5cm ●



右用

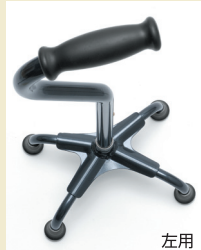

左用

右用、左用の切替ができます。

体に負担のかからない軽さが最大の魅力。  
脚部が太く、大きく、より安定した構造です。



にぎりやすい  
オリジナルグリップ

※便利なストラップ付も  
あります。

テトラ・ケイン  
ラージベース

- ・Sタイプ  
約63.5~73.5cm
- ・Mタイプ  
約73~83cm  
(1cm単位で調整可能)
- ・垂直耐荷重  
(4点接地時)  
約75kg
- ・カラー／  
●青墨 (あおずみ)

テトラ・ケイン  
ラージベース  
立ち上がり補助機能付

- ・Mタイプ  
約73.5~83.5cm  
(1cm単位で調整可能)
- ・垂直耐荷重  
(4点接地時)  
約75kg
- ・カラー／  
●青墨 (あおずみ)

脚ゴム




立ち上がる時の支えとして、手をかけやすい2段式グリップ



日本  
古色

色調は、長岡造形大学・松丸教授の監修により日本古色をベースにアレンジしました。


1cm単位で高さ調整ができます。

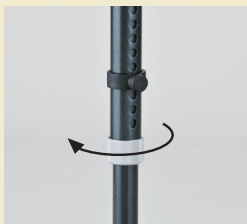

スライドロックナットを1回転緩めます。




インサートロックピンを引き抜きます。

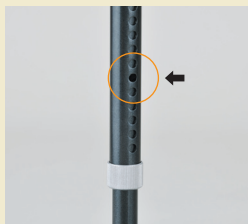

使用しやすい高さに調整し、穴の位置をあわせします。



インサートロックピンを合わせた穴に差し込みます。

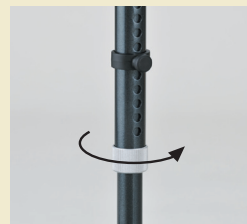

スライドロックナットをしめ、固定します。しっかり固定されていることを確認して、ご使用ください。

マグネシウム合金製 超軽量4点杖

●製造販売元

田辺プレス株式会社  
マグネシウム事業部

〒955-0814 新潟県三条市金子新田984-21  
TEL0256-32-1492 FAX0256-35-8095

●カタログと実際の製品とは印刷の関係で多少異なる場合もあります。●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

日本製