



福祉機器ブランドマーク

超軽量マグネシウム合金製 歩行補助具

MgウォーカーHigh&Low

軽く・使いやすい



軽さが最大の魅力 マグネシウム合金製で超軽量



インサート
ロックピン



グリップ
汚れや痛んだ場合
交換が可能です。

ご使用の際は横枠を開き、
ピンがロックされていること
を確認の上ご使用ください。
横枠は折りたたみ可能で、
立て掛け収納できます。

脚ゴム

M サイズ	重さ	約1.5kg
	横幅	約56cm (グリップ内幅 約44cm) (折りたたみ時 約80cm)
	奥行	約50cm (折りたたみ時 約8cm)
	高さ	約75～86cm
	垂直耐荷重(4点接地時)	約100kg



グリップは
左右別々の高さに
調整できます。

S サイズ	重さ	約1.4kg
	横幅	約48cm (グリップ内幅 約36cm) (折りたたみ時 約72cm)
	奥行	約50cm (折りたたみ時 約8cm)
	高さ	約67.5～74.5cm
	垂直耐荷重(4点接地時)	約100kg

1cm単位で高さ調整ができます。



ロックナットを1回転緩めます。



インサートロックピンを引き抜きます。



使用しやすい高さに調整し、
穴の位置をあわせませす。



インサートロックピンを合わせた
穴に差し込みます。



ロックナットをしめ、固定します。
しっかり固定されていることを
確認して、ご使用ください。

超軽量マグネシウム合金製 歩行補助具

●製造販売元

田辺プレス株式会社
マグネシウム事業部

〒955-0814 新潟県三条市金子新田984-21
TEL0256-32-1492 FAX0256-35-8095

●カタログと実際の製品とは印刷の関係で多少異なる場合もあります。 ●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

日本製